

KOD KATALOGOWY	AM-TL-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ AM-TL-01
CODE	AM-TL-01
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT AM-TL-01



PL: CZĘŚCI SKŁADOWE ORTEZY:

A. Podstawa ortezy
B,C. Elementy boczne

EN: COMPONENTS OF THE BRACE :

A. Base of the Brace
B,C. Side elements



1. PL: Odepnij elementy boczne (B i C) od podstawy ortezy (A).

EN: Detach the side pieces (B and C) from the base of the brace (A).



2. PL: Przyłóż element (A) do ręki w odpowiednim miejscu.

EN: Place part (A) in your hand in the correct place.

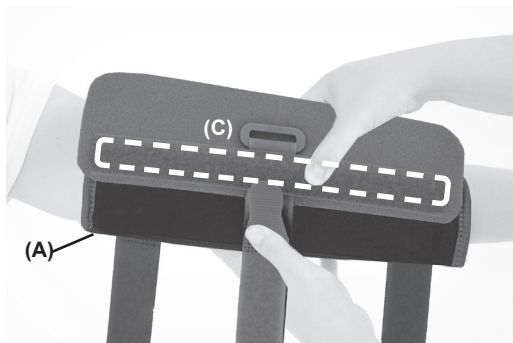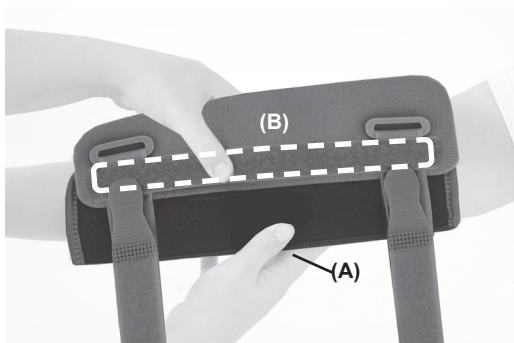

3. PL: Przypnij elementy boczne (B i C) do podstawy ortezy (A) w taki sposób, aby usztywnienia znajdowały się po bokach stawu łokciowego.

EN: Attach the side pieces (B and C) to the base of the brace (A) so that the braces are on the sides of the elbow.



4. PL: Przepleć paski przez klamerki i zapnij rzepy według podanej kolejności (1,2,3).

EN: Interlace the lower straps through the buckle and fasten the Velcro closures according to the following steps (1,2,3).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.