

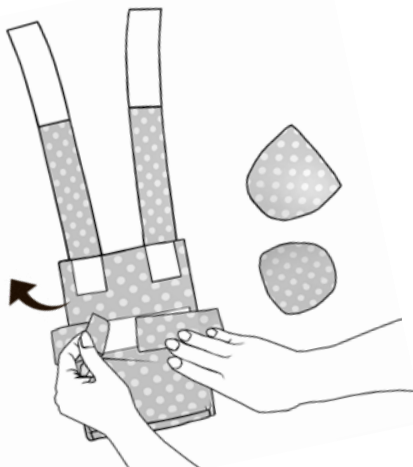


KOD KATALOGOWY	AM-SB-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-SB-07
CODE	PAM-SB-07
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-SB-07

PL: PODUSZKA FREJKI
EN: FREJKA PILLOW

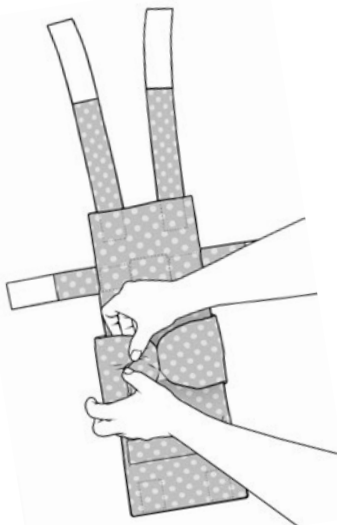

1. **PL:** Odepnij szelki i pas obwodowy.
EN: Reattach harness and trunk strap.

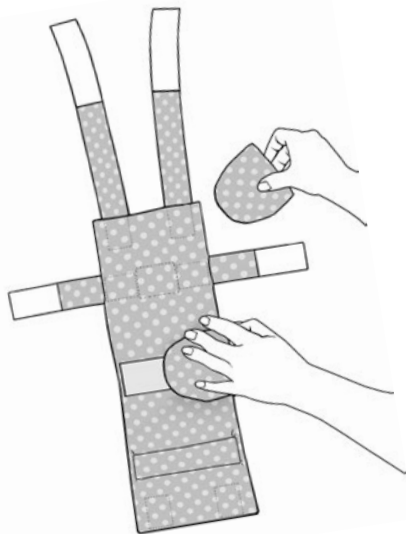

2. **PL:** Przypnij kliny odwodzące.
EN: Attach the abduction wedges.



3. **PL:** Połóż dziecko na poduszce.
EN: Place baby on the pillow.



4. **PL:** Zapnij pasy tułowia.
EN: Attach the trunk straps.



5. **PL:** Zapnij szelki.
EN: Attach the harness.



6. **PL:** Finalny produkt.
EN: Product is ready to use.