


KOD KATALOGOWY	AM-SB-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA BIODRA
MODEL	HIP ORTHOSIS AM-SB-04
CODE	AM-SB-04
TRADE NAME	HIP ORTHOSIS
MODEL	HIP ORTHOSIS AM-SB-04

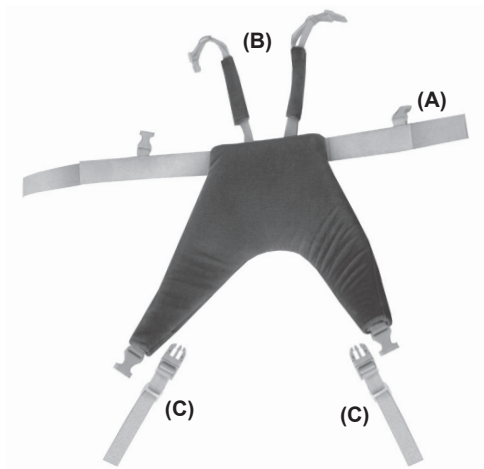

PL: ELEMENTY SKŁADOWE ORTEZY:


- A. Pas tułowia
- B. Szelki
- C. Pasy odwodzące

EN: COMPONENTS OF THE BRACE:

- A. Torso belt
- B. Suspenders
- C. Abduction belts


1. PL: Rozepnij ortezę.

EN: Unfasten the brace .

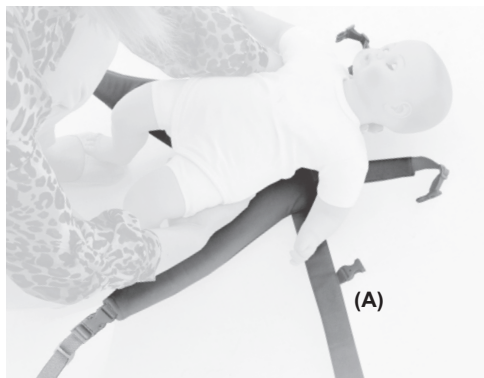


- 2. PL:** Połóż dziecko na ortezie w taki sposób, aby pas tułowia (A) znajdował się w odpowiednim miejscu.

EN: Place baby on the brace in such a way that the torso strap (A) is in the correct place.

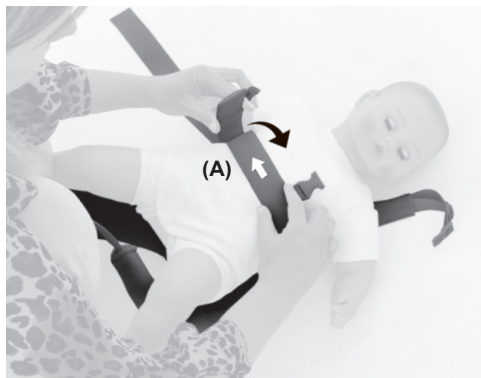


- 3. PL:** Zapnij pas tułowia (A) na rzep.


EN: Fasten the torso strap (A) with the Velcro fastener.

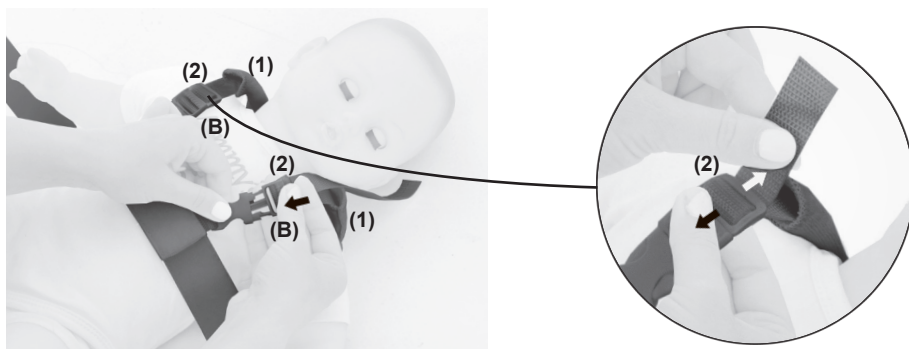


- 4. PL:** Zapnij szelki (B) na klamry zatrzaskowe. Ustaw osłony szyi (1) w odpowiednim miejscu. Jeśli istnieje potrzeba, wyreguluj długość taśm za pomocą regulatorów (2).
EN: Fasten the suspenders (B) with the buckles. Place the neck pad (1) in the right place. If necessary, use the adjuster to fit the length of the straps (2).

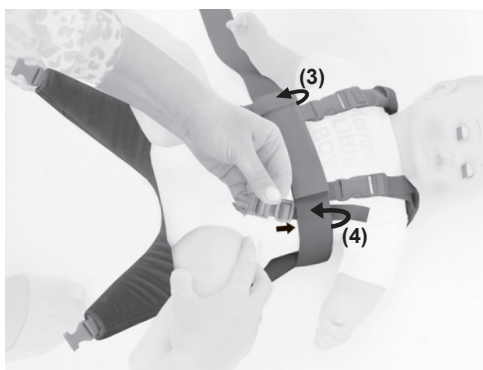


- 5. PL:** Przelóż uchwyt z klamerką (3,4) pod pasem (A) i zapnij na rzep.
EN: Pass the buckle (3,4) under the belt (A) and close it with Velcro.

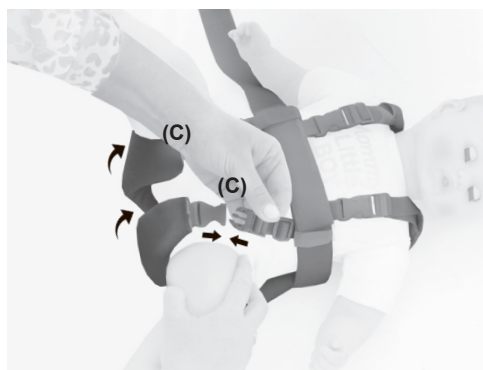

- 6. PL:** Zapnij pasy odwodzące (C) na klamerki zatrzaskowe.
EN: Fasten the straps (C) with the buckles.

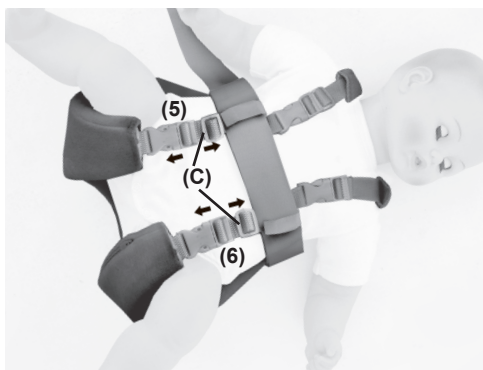

- 7. PL:** Ustaw odpowiedni kąt pasów odwodzących (C) za pomocą taśm i regulatorów (5,6).
EN: Adjust the angle of the abduction straps (C) with the straps and adjusters (5,6).

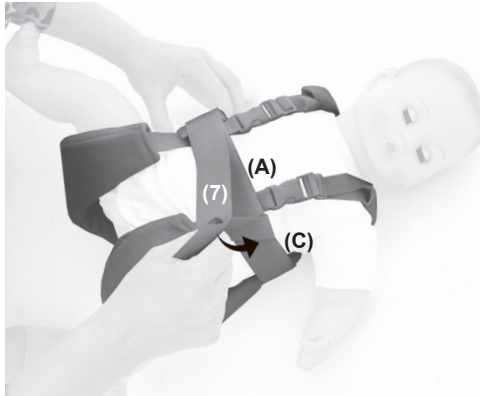

8. PL: Przypnij rzep zabezpieczający (7) do pasa (A) i taśmy (C).

EN: Attach the Velcro fastener (7) to the belt (A) and the strap (C).

WERSJA I - PASY PROSTE
VERSION I - NORMAL STRAPS

WERSJA II - PASY SKRZYŻOWANE
VERSION II - CROSSED X-STRAPS



9. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.