



KOD KATALOGOWY	AM-KG-AR/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	AM-KG-AR/1R
CODE	AM-KG-AR/1R
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	AM-KG-AR/1R

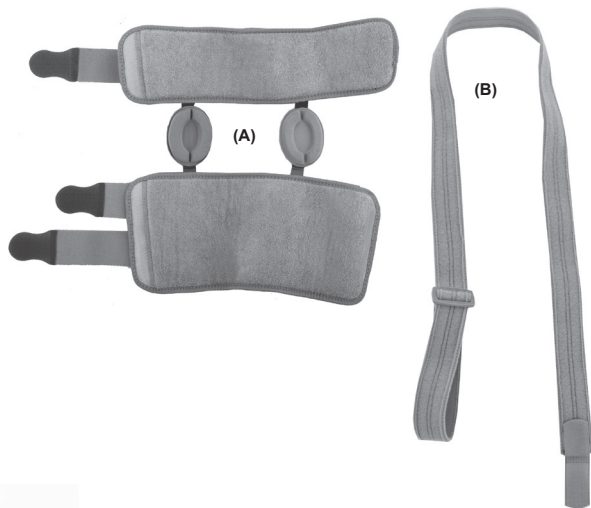

PL: A. Orteza
B. Temblak


EN: A. Brace
B. Sling

1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

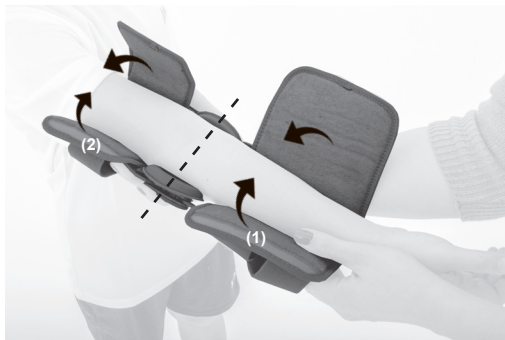


2. PL: Załóż ortezę na rękę w taki sposób, aby zegary szyny znajdowały się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej i zapnij ortezę na rzepy (1,2).

EN: Place the orthosis on the upper limb to keep the drop lock on the lateral epicondyle and fasten the brace with Velcro (1,2).

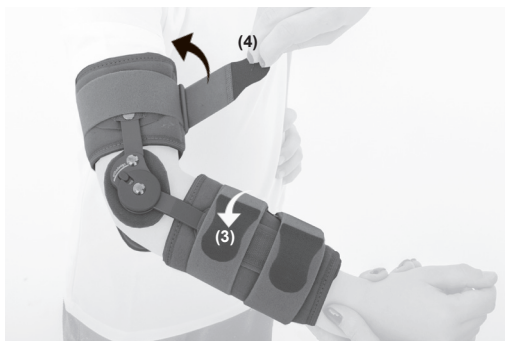


3. PL: Zapnij rzepy według podanej kolejności (3,4,5).
EN: Fasten the Velcro closures according to the following steps (3,4,5).

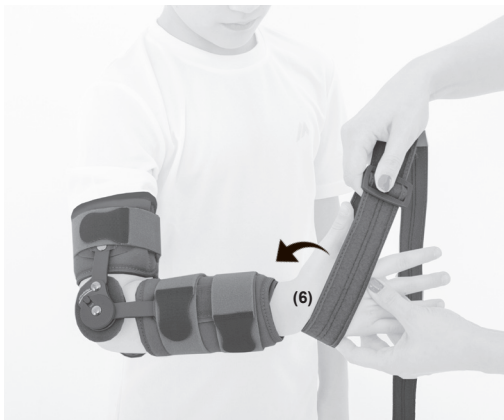

4. PL: Załóż pasek na przedramię (6), przełóż według wskazanego kierunku (7).

EN: Put the strap on your forearm (6), then place it on your neck as shown in the picture (7).

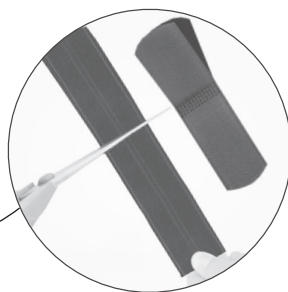

5. PL: Zapnij temblak na rzep (8). Jeśli jest potrzeba, odetnij zbędną długość paska.

EN: Fasten the Velcro sling (8). If necessary, cut the needless part off.



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.