


KOD KATALOGOWY	OKG-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-01
CODE	OKG-01
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-01

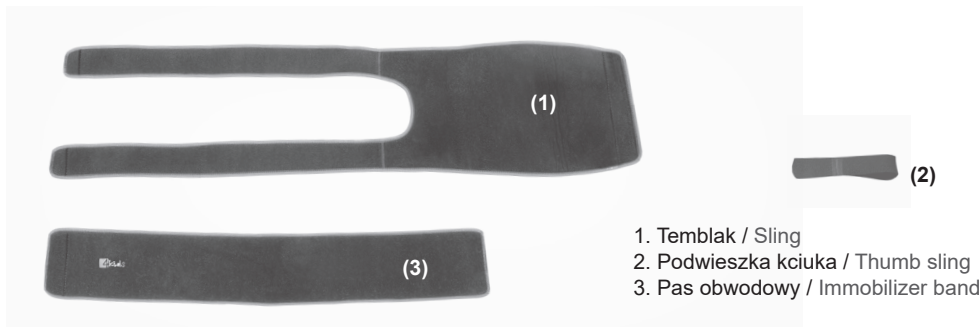

**1. PL:** Załóż temblak na ramiona. Umieść kciuk w podwieszce (1), ustaw rękę w odpowiedniej pozycji terapeutycznej (90°- 45°) i w odpowiednim miejscu przypnij podwieszkę do wyrobu.

**EN:** Place straps over each shoulder. Then, put your thumb in the sling (1), set your hand in the appropriate therapeutic position (90°- 45°) and attach the sling in the right place.



**2. PL:** Zapnij przednią część tembla (2).

**EN:** Fasten the Velcro closure (2).




- 3. PL:** Skrzyżuj tylne pasy naramienne.  
**EN:** Cross the shoulder straps on your back.



- 4. PL:** Zapnij rzepowe zapięcia z przodu temblaka (3,4).  
**EN:** Fasten the Velcro closures on the sling (3,4).

- 5. PL:** Przypnij pas obwodowy do przedniej części ortezy (5), owiń go wokół tułowia i ręki, a następnie zapnij rzep (6) z przodu.  
**EN:** Attach the circumferential strap to the front part of the brace (5), wrap it around your body and arm, and then close the Velcro (6) on the front.

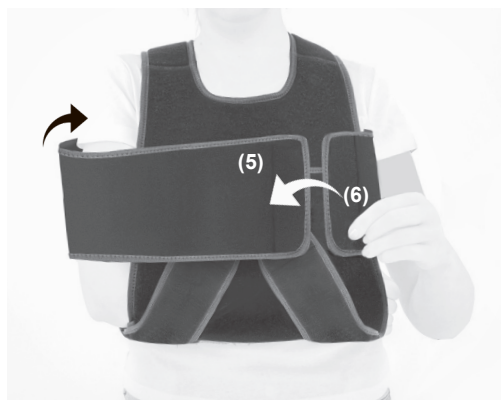

- 6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.