


KOD KATALOGOWY	AM-TUD-KD
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-TUD-KD
CODE	AM-TUD-KD
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-TUD-KD



**A:** Podstawa ortozy  
/ Orthosis base  
**B,C:** Elementy boczne  
/ Side elements

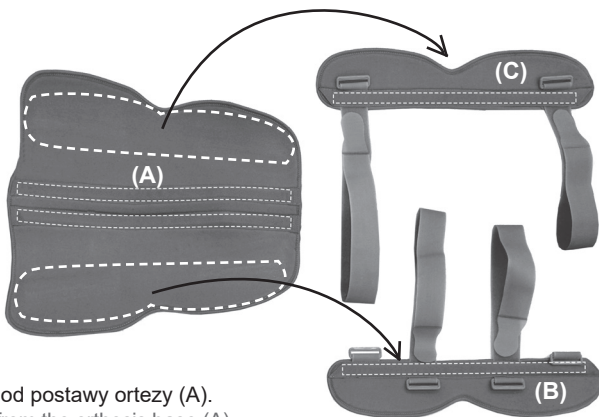

- 1. PL:** Odepnij elementy boczne (B i C) od postawy ortozy (A).  
**EN:** Detach the side pieces (B and C) from the orthosis base (A).



- 2. PL:** Zawsze zakładaj stabilizator na siedząco.  
Dopasuj element (A) z wyprofilowanymi  
stalkami do nogi.  
**EN:** Always put the stabilizer on when seated.  
Fit the element (A) with orthopaedic stays  
to the leg.

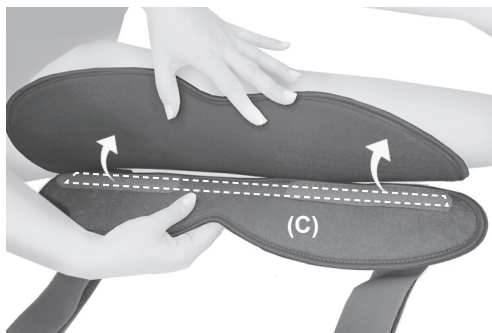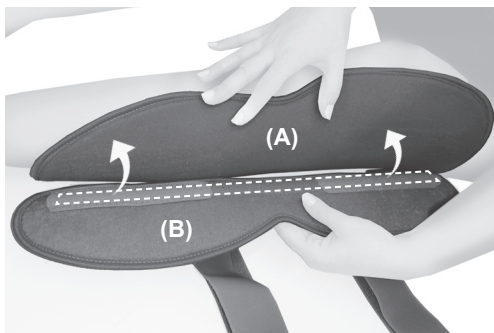

- 3. PL:** Przypnij elementy boczne (B i C) do postawy ortozy (A).  
**EN:** Attach the side pieces (B and C) to the orthosis base (A).




**4. PL:** Boczne usztywnienia powinny być ustawione po bokach stawu kolanowego (w linii szpary stawowej).

**EN:** The side elements should be positioned on the sides of the knee joint (in the line of the joint space).

**5. PL:** Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (1,2,3,4). Zapinanie ortozy zawsze zaczynaj od pasków leżących najbliżej stawu kolanowego.

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (1,2,3,4). First, buckle the straps which are the closest to the knee.

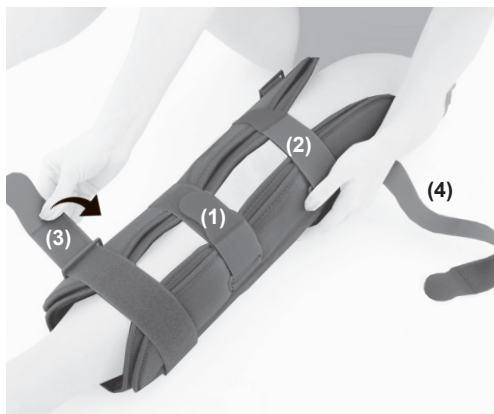

**6. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.