

KOD KATALOGOWY	AM-OSN-L-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	AM-OSN-L-02
CODE	AM-OSN-L-02
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	AM-OSN-L-02



(B)



(A)

A. Orteza / Brace

B. Osłona palców / Fingers cover.

1. PL: Rozepnij ortezę.

EN: Open the brace.



(A)



(2)

(1)

(3)


2. PL: Załóż ortezę (A) na rękę i umieść kciuk w osłonie.
Uwaga! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie, w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.

EN: Put the brace (A) on your hand and place your thumb in the cover.


Attention! Before putting the device on, it is necessary to precisely adjust all the stiffening installed in the brace in order to reach the desired positioning of the secured joint or other part of the body.

3. PL: Przepleć paski przez klamki i zapnij na rzepy według podanej kolejności (1,2,3).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten with Velcros according to the following steps (1,2,3).

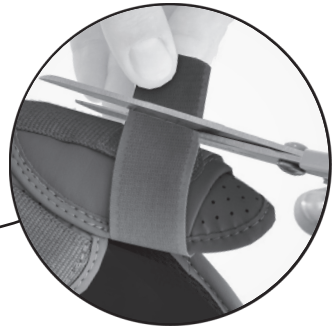

- 4. PL:** Zapnij rzep obejmujący kciuk (4). Jeśli jest taka potrzeba, odetnij nadmiar rzepa.
EN: Close the Velcro around the thumb (4). If necessary, cut off any excess part.

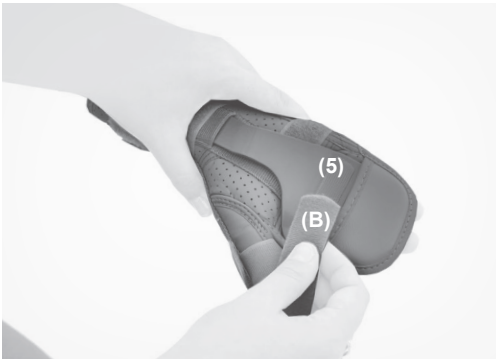

- 5. PL:** Przytnij osłonę palców (B) do rzepa (5), oplatając nią palce.
EN: Attach the finger cover (B) to the Velcro (5) and wrap it around your fingers.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.