


|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-TX-04                |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA TUŁOWIA          |
| MODEL          | ORTEZA TUŁOWIA AM-TX-04 |
| CODE           | AM-TX-04                |
| TRADE NAME     | TORSO SUPPORT           |
| MODEL          | TORSO SUPPORT AM-TX-04  |

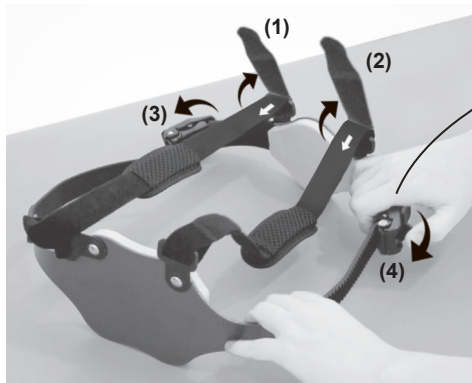


**1. PL:** Przed założeniem ortozy, wypęlc paski (1,2) z klamerek, połuzuj napinacze (3) i rozepnij (4).

**EN:** Before putting on the orthosis, unfasten the straps (1,2) from the buckles, loosen the tensioners (3) and undo the tensioner (4).




**2. PL:** Przyłóż ortezę do pleców (5).

**EN:** Place the brace against your back (5).

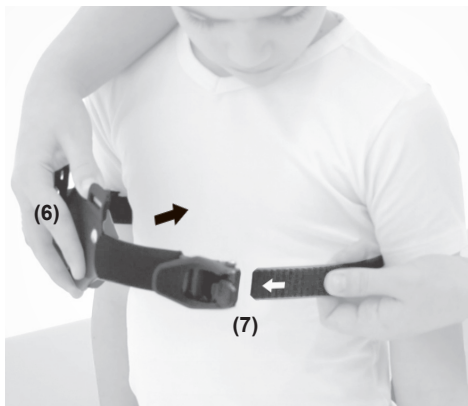

**3. PL:** Przyłóż pelotę przednią w odpowiednim miejscu (6) i włóż pasek w napinacz (7).

**EN:** Place the front pad in the right place (6) and put the belt in the tensioner (7).

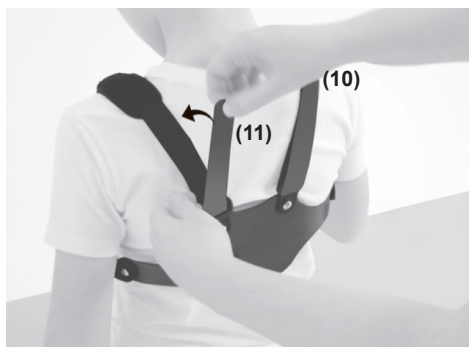

- 4. PL:** Ustaw odpowiednią długość pasek naramiennych (8,9,10,11) i zapnij na rzepy.  
**EN:** Adjust the shoulder straps to the correct length (8,9,10,11) and fasten with Velcro.



- 5. PL:** Ustaw kompresję za pomocą napinaczy.  
**EN:** Set the required level of compression.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.