


KOD KATALOGOWY	AM-WSP-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
MODEL	AM-WSP-06
CODE	AM-WSP-06
TRADE NAME	SPINAL ORTHOSIS
MODEL	AM-WSP-06

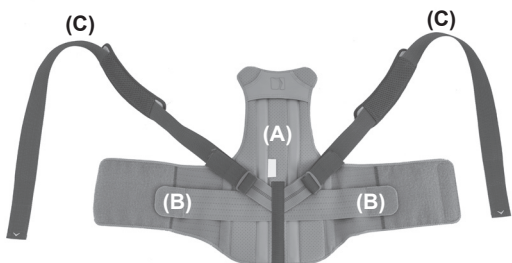


- (A) ORTEZA / BRACE
- (B) PASY DOCIĄGOWE / TENSION BELTS
- (C) SZELKI / SUSPENDERS




1. PL: Rozepnij ortezę i poluzuj pasy dociągowe (B).
EN: Unfasten the brace and loosen the tension belts (B).


2. PL: Przyłóż ortezę (A) do pleców na odpowiedniej wysokości.
EN: Place the brace (A) on your back at the appropriate height.

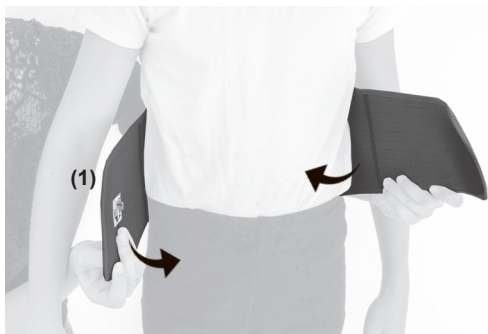

3. PL: Zapij przednią część ortozy na rzep (1).
EN: Fasten the front part of the brace with Velcro (1).



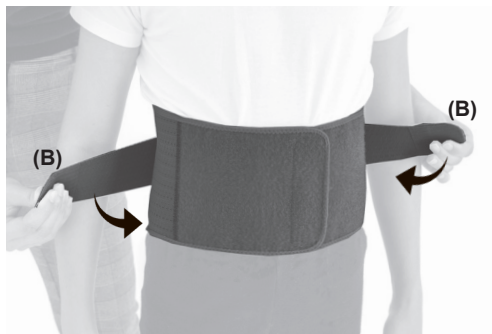


4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapij pasy dociągowe (B) na rzepy w przedniej części ortozy.
EN: Set the appropriate compression and fasten the tension belts (B) with the Velcro fasteners in the front part of the brace.

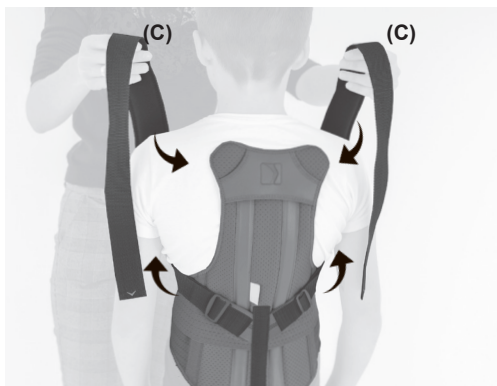

5. PL: Przełóż szelki (C) pod pachami i przez ramiona, następnie umieść je w stabilizatorze (2) i skrzyżuj na plecach. Przypnij końce szelek do przedniej części ortozy na rzepy (3,4).

EN: Put the harness (C) under your armpits and over your shoulders, then place them in the brace (2) and cross them over your back. Attach the ends of the harness to the front of the Velcro brace (3,4).

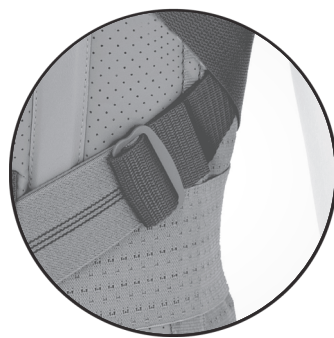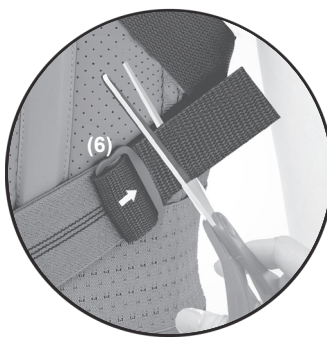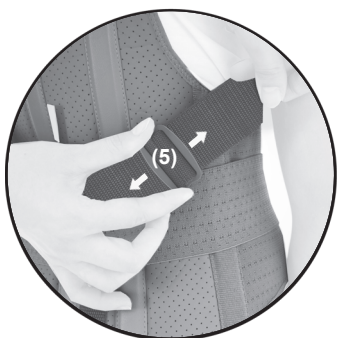

PL: UWAGA! Jeśli istnieje potrzeba skrócenia szelek, odepnij rzepy (3,4) od przedniej części ortozy, wypłec taśmy z regulatorów (5), ustaw ich odpowiednią długość, symetrycznie po lewej i prawej stronie. Zablokuj taśmy w klamercie (6). Jeśli zajdzie potrzeba odetnij nadmiar taśm i ponownie przypnij końce szelek do przedniej części ortozy.

EN: ATTENTION! If there is a need to shorten the harness, unfasten the Velcro (3,4) from the front part of the brace, remove the straps from the adjusters (5), set them to the appropriate length, symmetrically on the left and right side. Lock the tapes in the buckle (6). If necessary, cut off any excess straps and reattach the ends of the harness to the front of the brace.



6. PL: Ustaw osłonę szelek (7) w odpowiednim miejscu.

EN: Place the harness cover (7) in a suitable place.



7. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.