




KOD KATALOGOWY	AM-TX-04 /24H
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-TX-04
CODE	AM-TX-04 /24H
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-TX-04

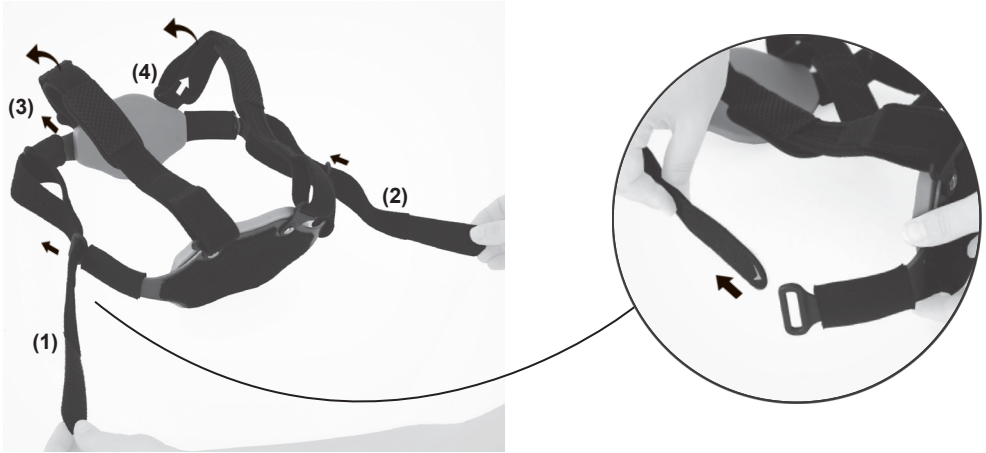

- 1. PL:** Przed założeniem ortozy, wypłść paski (1,2,3,4) z klamerek.
EN: Before putting on the orthosis, loose the straps (1,2,3,4) out of the buckles.

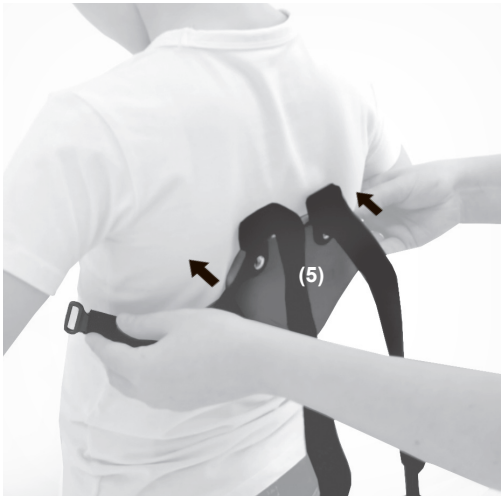


- 2. PL:** Przyłóż ortezę do pleców (5).
EN: Put the brace on your back (5).

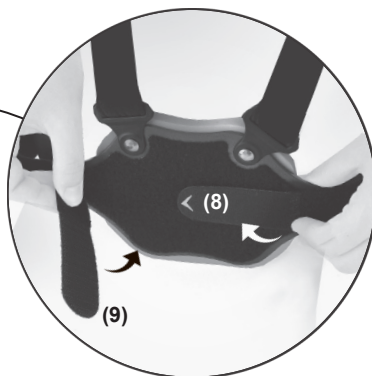

3. PL: Umieść pelotę przednią w odpowiednim miejscu (6). Następnie przełóż paski przez boczne klamki (7) i zapnij paski z tyłu wyrobu na rzepy (8,9) ustawiając odpowiednią kompresję.

EN: Put the front support in the right place (6). Then put the straps through the side buckles (7) and fasten the straps at the back of the product with Velcro (8,9) setting the appropriate compression.

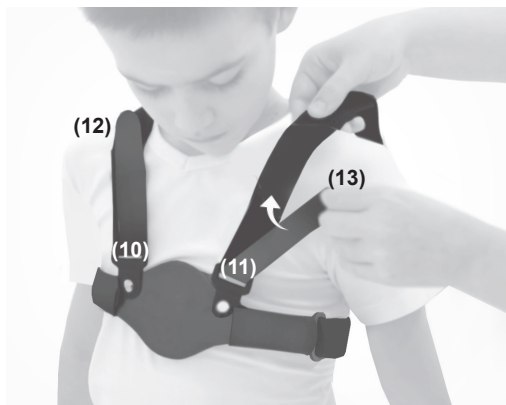

4. PL: Przepleć paski przez klamki przednie (10,11) i zapnij rzepy (12,13). Umieść osłony szelek (14) w odpowiednim miejscu. Ustaw pożądaną długość oraz napięcie pasów naramiennych i zapnij rzepy (15,16).

EN: Interlace the straps through the front buckles (10,11) and fasten the Velcro fasteners (12,13). Put the harness covers (14) in place. Set the appropriate length and tension of the shoulder straps and fasten the Velcro fasteners (15,16).



5. PL: Jeżeli istnieje potrzeba skoryguj napięcie bocznych zapięć.

EN: If necessary, adjust the tension of the side fasteners.



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.