



KOD KATALOGOWY	FREMI
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ODWODZĄCA STAWY BIODROWE DLA DZIECI FREMI
MODEL	
CODE	FREMI
TRADE NAME	HIP JOINT ABDUCTION ORTHOSIS FOR CHILDREN FREMI
MODEL	



(A) Klin odwodzący / Abduction wedge  
 (B) Pasy stabilizujące / Stabilizing straps  
 (C) Osłona pokręta / Knob cover

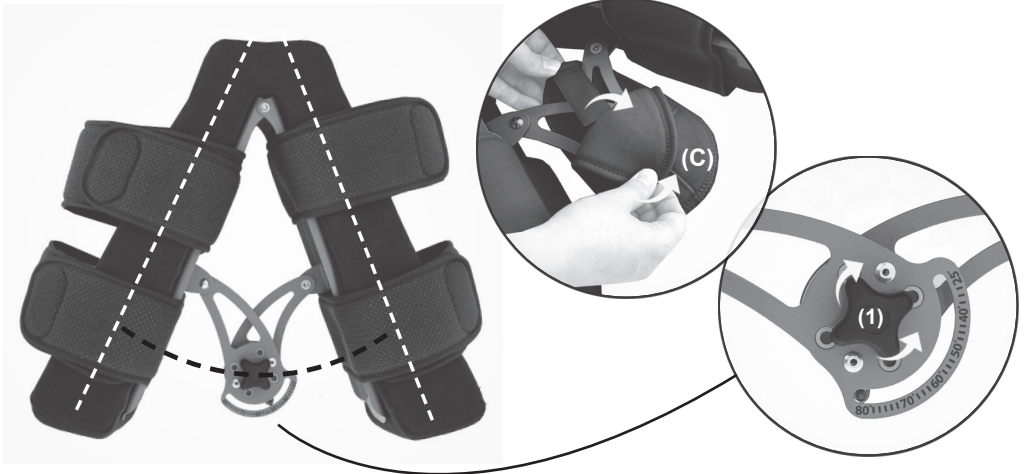


- 1. PL:** Przed umieszczeniem klina pomiędzy kończynami, należy zdjąć osłonę pokręta (C) i ustawić pożądany kąt odwiedzenia (25-80°), według wskazań określonych przez lekarza prowadzącego. Regulacji dokonujemy przy pomocy pokręta blokującego (1).
- EN:** Before placing the wedge between the limbs, remove the knob cover (C) and set the desired abduction angle (25-80°), according to the indications specified by the attending physician. Adjustment is made using the locking knob (1).

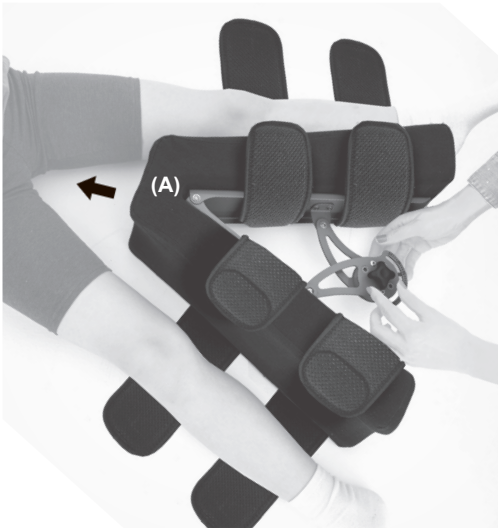




**2. PL:** Rozepnij pasy stabilizujące (B). Upewnij się, że ustawiony wcześniej kąt jest zablokowany. Następnie wsuń ortezę (A) pomiędzy kończyny dolne. Zaleca się ustawienie klina odwodzącego jak najbliżej spojenia łonowego, między kończynami dolnymi.

**EN:** Unfasten the stabilizing straps (B). Make sure the angle you set earlier is locked. Then slide the brace (A) between your lower limbs. It is recommended to place the abduction wedge as close as possible to the pubic symphysis, between the lower limbs.

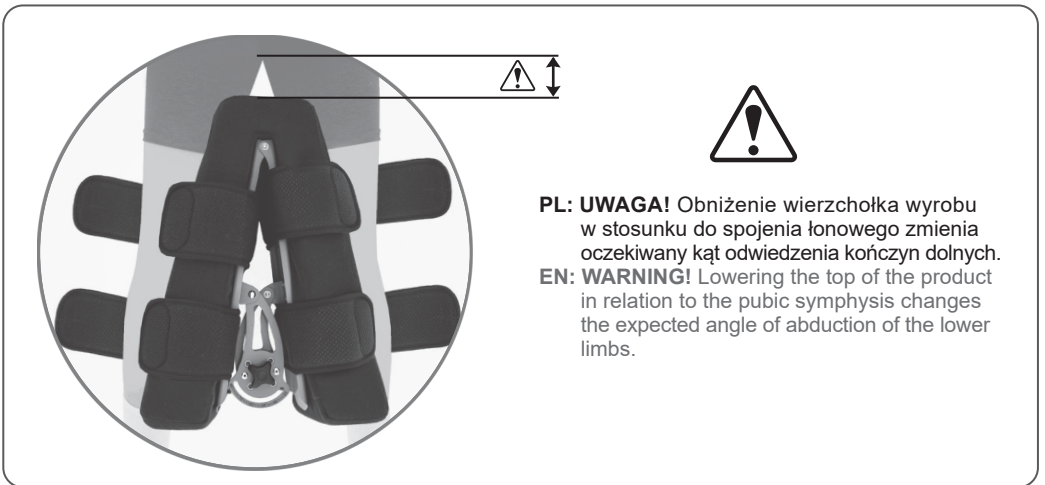

**PL: UWAGA!** Obniżenie wierzchołka wyrobu w stosunku do spojenia łonowego zmienia oczekiwany kąt odwiedzenia kończyn dolnych.

**EN: WARNING!** Lowering the top of the product in relation to the pubic symphysis changes the expected angle of abduction of the lower limbs.

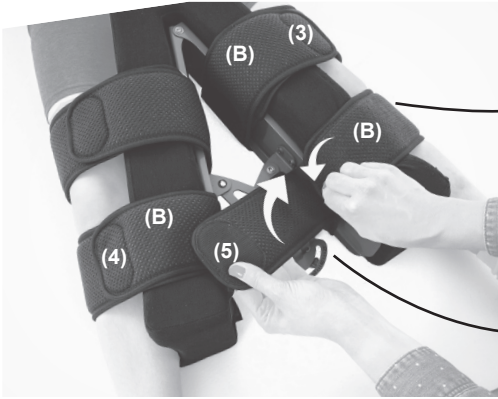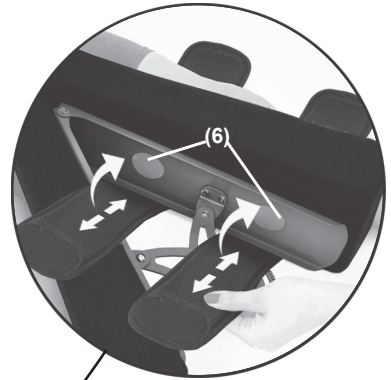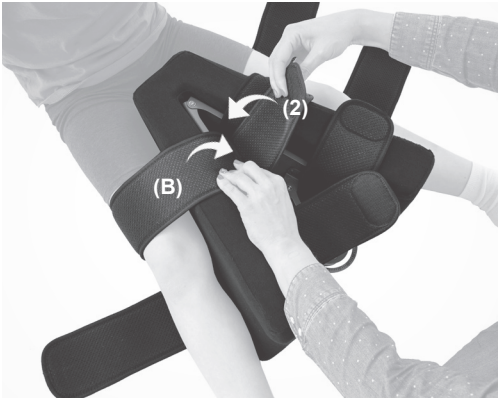

- 3. PL:** Zapnij pasy stabilizujące (B) obwodowo na rzepy w podanej kolejności (2,3,4,5). Zapnij na rzep osłonę pokręta (C). Jeśli istnieje potrzeba skoryguj miejsca dopięcia pasów (B) do klina na rzepy (6).
- EN:** Fasten the stabilizing straps (B) circumferentially with Velcro in the order given (2,3,4,5). If necessary, adjust the places where the belts (B) are attached to the Velcro wedge (6).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
- EN:** Product is ready to use.