



KOD KATALOGOWY	AM-DOSK-O/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-DOSK-O/1R
CODE	AM-DOSK-O/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-DOSK-O/1R

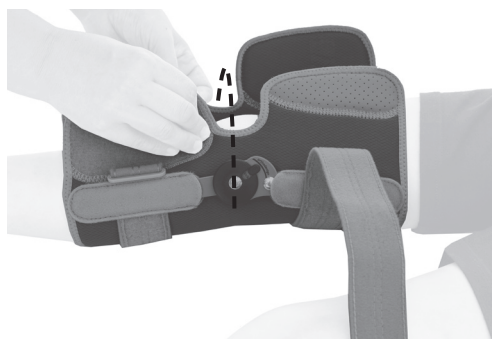



**1. PL:** Wyciąć paski z klamerek i rozepnij ortezę.

**EN:** Remove the straps from the buckles and unfasten of the brace.

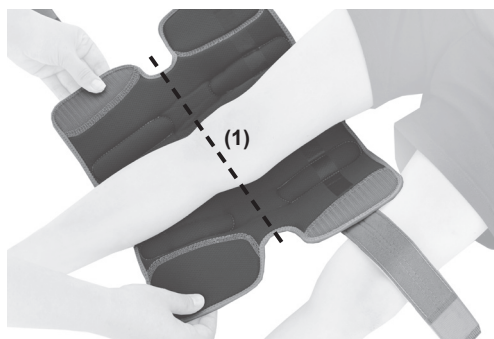


**2. PL:** Przyłóż ortezę do nogi (1) w taki sposób, aby zegary szyn znajdowały się w osi stawu kolanowego, w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu. Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolanowego i przylega równomiernie do całej kończyny.

**EN:** Apply the brace to the leg (1) in such a way that the drop locks of the splints are in the axis of the knee joint, within the range of joint mobility specified by the attending physician. Only a properly worn brace remains in the axis of the knee joint and adheres evenly to the entire limb.

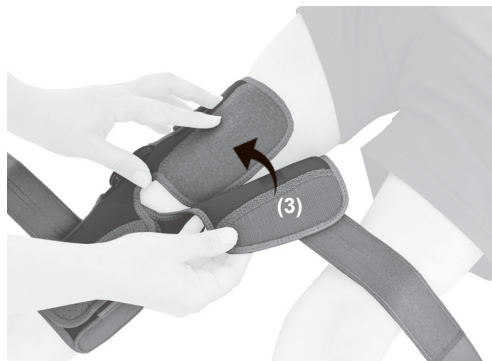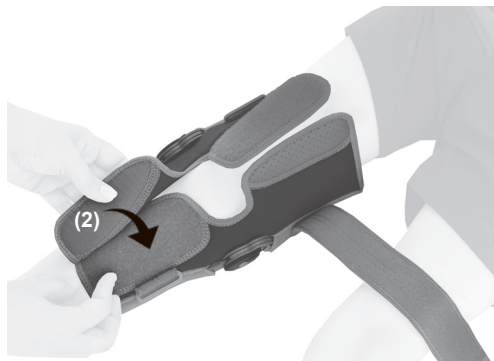

**3. PL:** Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (2,3).

**EN:** Fasten the brace at the back with Velcro according to the following steps (2,3).

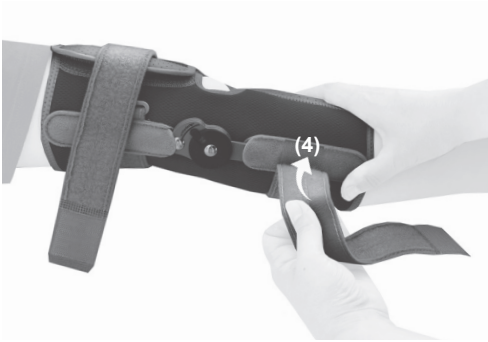

**4. PL:** Przypnij dolny pas obwodowy na rzep (4) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć go przez kłamek i zapnij na rzep (5).

**EN:** Fasten the lower circumferential strap with the Velcro (4) setting the appropriate compression. Interlace it through the buckle and fasten with Velcro (5).



**5. PL:** Przypnij górne pas obwodowy na rzep (6) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć go przez kłamek i zapnij na rzep (7).

**EN:** Fasten the upper circumferential strap with the Velcro (6) setting the appropriate compression. Interlace it through the buckle and fasten with Velcro (7).



**6. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.