

KOD KATALOGOWY	AM-DOSK-Z/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-DOSK-Z/1R
CODE	AM-DOSK-Z/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-DOSK-Z/1R



1. PL: Wypłeć paski z klamerek i rozepnij górną część ortozy.

EN: Remove the straps from the buckles and unfasten the upper part of the brace.




2. PL: Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka (1) znalazła się w otworze okołorzepkowym, a zegary szyn (2) znajdowały się w osi stawu kolanowego w określonym przez lekarza prowadzącego w zakresie ruchomości stawu. Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolanowego i przylega równomiernie do całej kończyny. Następnie zapnij rzep (3).

EN: Put the brace on your leg and pull it up (1) to keep the kneecap in the patellar hole, and the drop locks of the splints (2) in the axis of the knee joint, only within the range of joint mobility specified by the attending physician. Only a properly fitted brace remains in the axis of the knee joint and lies against the entire limb. Fasten the Velcro closures (3).



3. PL: Przypnij dolny pas obwodowy na rzep (4) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć go przez klamrę i zapnij na rzep (5).

EN: Fasten the lower circumferential strap with the Velcro (4) setting the appropriate compression. Interlace it through the buckle and fasten with Velcro (5).

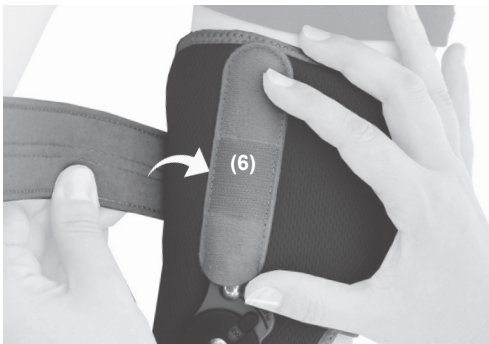

4. PL: Przypnij górny pas obwodowy na rzep (6) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć go przez klamrę i zapnij na rzep (7).

EN: Fasten the upper circumferential strap with the Velcro (6) setting the appropriate compression. Interlace it through the buckle and fasten with Velcro (7).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.