



KOD KATALOGOWY	KLP-01
NAZWA HANDLOWA	KLIN
MODEL	KLP-01
CODE	KLP-01
TRADE NAME	WEDGE
MODEL	KLP-01

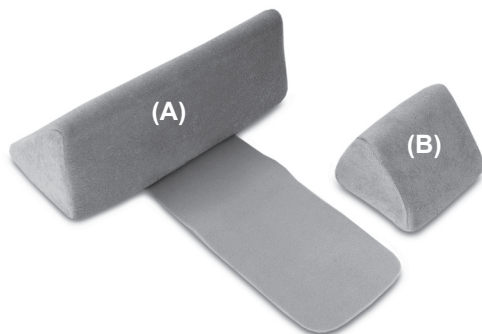

(A) Klin duży / Large wedge
(B) Klin mały / Small wedge

1. **PL:** Odepnij klin (B) od stabilizatora.
EN: Remove the wedge (B) from the stabilizer.

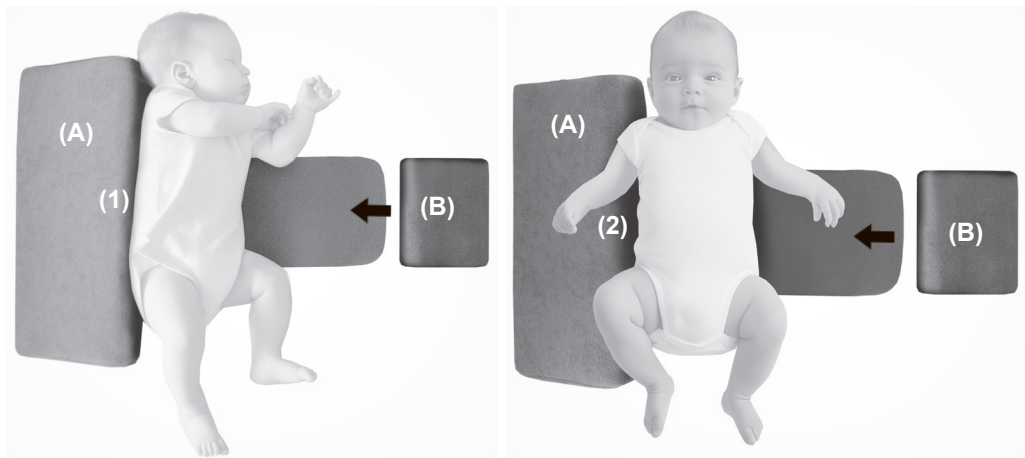

2. **PL:** Ułóż dziecko na stabilizatorze w taki sposób aby klin (A) podtrzymywał dziecko z tyłu (1) lub boku (2), a materiał łączący kliny znajdował się nie wyżej niż linia pachy. Przypnij klin (B) na rzep blisko dziecka, aby zapobiec przekręceniu się na brzuszek.

EN: Place the child on the stabilizer so that the wedge (A) supports the child from the back (1) or side (2), and the material connecting the wedges is no higher than the armpit line. Fasten the wedge (B) with Velcro close to the baby to prevent him from rolling onto his tummy.



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.