






KOD KATALOGOWY	AM-SOB-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	AM-SOB-03
CODE	AM-SOB-03
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-SOB-03

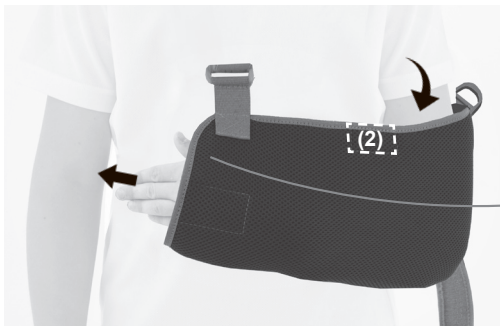

- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę. Następnie umieść kciuk w specjalnej pętelce (1) i zapnij rękaw (2).
EN: Place the brace on your arm. Then insert your thumb into the special loop (1) and secure the sleeve (2).




- 2. PL:** Przypnij klamerkę z rzepem (3) do wewnętrznej strony rękawa w zaznaczonym na zdjęciu miejscu.

EN: Attach the Velcro clip (3) to the inside of the sleeve at the location shown in the picture.

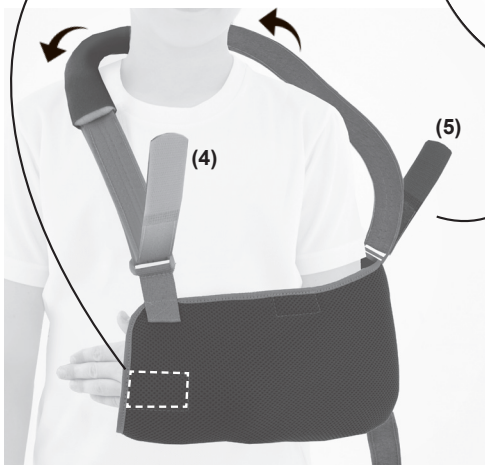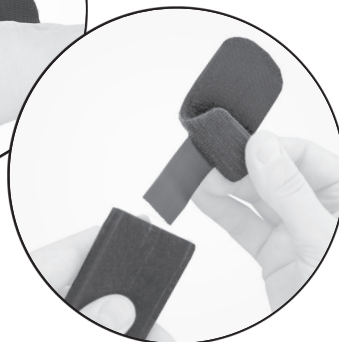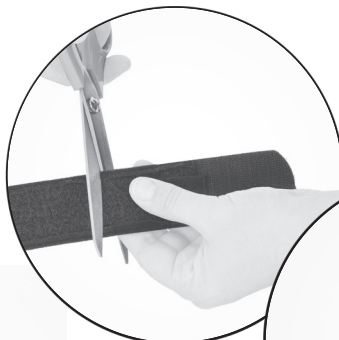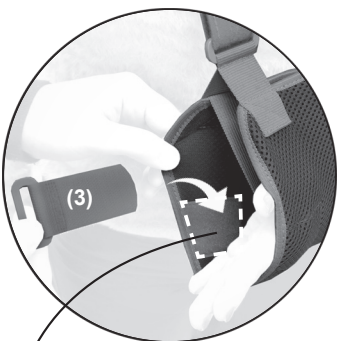

- 3. PL:** Przelóż pas przez szyję i za pomocą rzepa (4, 5) ustaw jego odpowiednią długość. Jeśli istnieje potrzeba odetnij zbędną długość tylnego pasa i zapnij rzep (5).

EN: Place the strap around your neck and adjust its length using the Velcro (4, 5). If needed, trim the excess length of the back strap and secure it with Velcro (5).

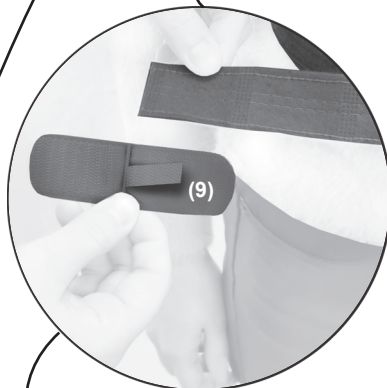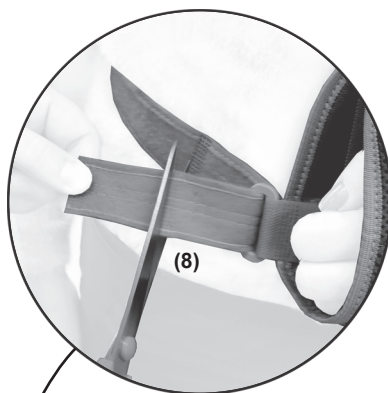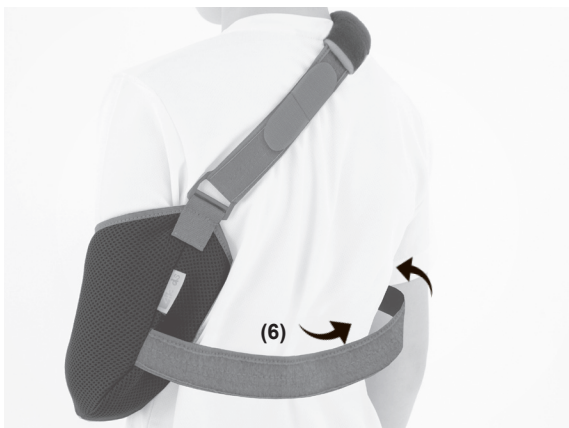

4. PL: Przełóż pas obwodowy (6) przez plecy, przepleć go przez klamrę (7). Jeżeli istnieje potrzeba, odetnij jego zbędną długość w miejscu zgrzewu (8).

EN: Wrap the circumferential strap (6) around your back and thread it through the buckle (7). If needed, trim any excess length at the seam (8).

5. PL: Przyczep rzep (9) do paska i zapnij go.

EN: Attach Velcro (9) to the strap and secure it.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.