

KOD KATALOGOWY	OSS-OS-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY
MODEL	OSS-OS-07
CODE	OSS-OS-07
TRADE NAME	FOOT ORTHOSIS
MODEL	OSS-OS-07



(A) Opaska kostki / Ankle strap.
(B) Pasek na palec / Finger strap.

1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



2. PL: Zapnij opaskę (A) na nodze.
EN: Fasten the strap (A) on the leg.



3. PL: Opleć opaskę (A) dookoła nogi i zapnij na rzep (1).
EN: Wrap the strap (A) around the leg and fasten it with the Velcro (1).



4. PL: Umieść palec w otworze, taśmę zewnętrzną (2) przełóż pod stopę. Skrzyżuj taśmy, ustaw odpowiednie napięcie i przypnij rzepy (3,4) do opaski (A).
EN: Place the toe in the opening and pass the outer strap (2) under the foot. Cross the straps, adjust the appropriate tension, and fasten the Velcro tabs (3,4) to the strap (A).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.